


ضبط مستوى الصوت عبر المفتاح التبديلي



يتيح لك ضبط مستوى الصوت رفع مستوى صوت أجهزة المساعدة السمعية أو خفضه.

١- لرفع مستوى الصوت، اضغط على الطرف العلوي من المفتاح التبديلي.

٢- لخفض مستوى الصوت، اضغط على الطرف السفلي من المفتاح التبديلي.

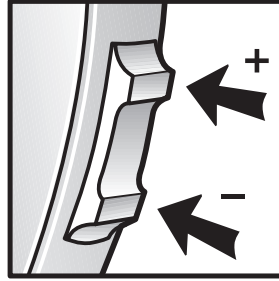

عند رفع مستوى الصوت أو خفضه، ستسمع صوت صفير واحدًا عند كل ضغطة. عند الوصول إلى الحد الأقصى أو الأدنى لمستوى الصوت، ستسمع صوت صفير مزدوجًا. هذه التغييرات في مستوى الصوت مؤقتة، وعندما تعيد تشغيل جهاز المساعدة السمعية التابع لك سيعود إلى مستوى الصوت المعين من قبل اختصاصي السمع المتابع لحالتك. يرجى استخدام تطبيق BeMore إذا كنت تود حفظ إعدادات ضبط مستوى الصوت هذه باستخدام ميزة "Favourite" (المفضلة).

للحصول على مزيد من الدعم، امسح ضوئيًا رمز الاستجابة السريعة QR أو تفضل بزيارة
بوابتنا الإلكترونية لدعم المرضى عبر الرابط: danalogic.co.uk/patient-portal

